


UPUTSTVO ZA UPOTREBU - **NESTERILNA STRANA**

AMSCO 600 PARNI STERILIZATOR

1.

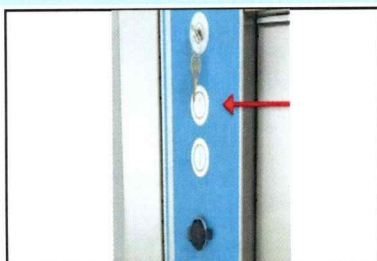

- Uključiti parni sterilizator okretanjem prekidača sa ključem za 90 stepeni u smeru kazaljke na satu
- Parni sterilizator se aktivira kada operater ukuca šifru i lozinku na ekranu
- Pritisnite polje **USER NAME (Korisničko ime)** i unesite korisničko ime
- Pritisnite polje **PASSWORD (Lozinka)** i unesite lozinku

2.




- Nakon uspešne prijave prikazaće se STERIS ekran

3.




- Pritisnite dugme za otvaranje vrata parnog sterilizatora i držite neprekidno dok se komora ne otvori
- Ubacite i ravnomerno rasporedite pripremljen materijal za sterilizaciju u komoru
- **NEMOJTE PREPUNITI STERILIZATOR!**
- Maksimalna dozvoljena težina umotanih tacni ili kompleta instrumenata je 80 Kg!
- Maksimalna dozvoljena težina pakovanja tekstilnog materijala je 60 Kg!

4.

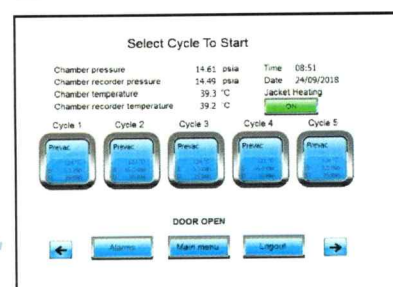

- Pritisnite dugme za zatvaranje vrata i držite ga neprekidno dok se komora ne zatvori
- Dodirom na taster **OPERATER MODE (Režim operatera)** pristupate opciji **SELECT CYCLE (Izbor ciklusa)**
- Potvrdite izabrani ciklus pritiskom na sliku odgovarajućeg ciklusa
- Da biste započeli izabrani ciklus, pritisnite dugme **START (Započni)**

5.

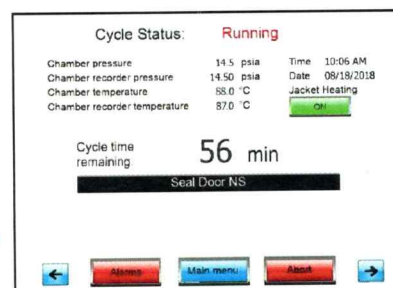

- Proces sterilizacije započinje kada aparat postigne sve parametre uz odabir adekvatnog ciklusa

UPUTSTVO ZA UPOTREBU - **STERILNA STRANA**

AMSCO 600 PARNI STERILIZATOR

1.
 - Završen proces sterilizacije signalizira svetlo na dugmetu za otvaranje i zatvaranje vrata
 - Na ekranu se prikazuje **COMPLETED (ZAVRŠENO)**
 - Pritisnuti dugme na ekranu **OPERATE A SIDE**
-

2.
 - Neprekidnim pritiskom na dugme otvorite vrata komore do kraja!
-

3.
 - Izvucite sterilni materijal iz komore sterilizatora uz adekvatnu **LIČNU ZAŠTITNU OPREMU**
 - **OPASNOST OD OPEKOTINA:** Kolica za punjenje, vrata sterilizatora i druge površine su izuzetno vruće nakon završenog ciklusa!
-

4.
 - **Sterilan materijal** skinuti sa rešetke i vratiti rešetku u komoru aparata
-

5.
 - Pritisnite dugme za zatvaranje vrata i držite ga neprekidno dok se komora ne zatvori
-

6.
 - Na ekranu aktiviramo **PROLAZNI PROGRAM (PASS THROUGH)** koji omogućava otvaranje vrata na **NESTERILNOJ STRANI**